

# Lingettes nettoyantes désinfectantes ASEPTONET

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel.

Nouvelle formule sans alcool.



**Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipement et mobilier sans contact avec les denrées alimentaires).**



## Formule

Actif: Dimethylbenzylammonium chloride  
(n° CAS7173-51-5) : 0.29%.

Parfum : menthol

Soulever le couvercle et/ou l'étiquette autocollante.

Sortir une lingette du paquet. Refermer le paquet soigneusement afin d'éviter le dessèchement des lingettes. Passer 3 lingettes par m<sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.



## Propriétés microbiologiques

En 5 minutes et en conditions de saleté (sauf \*) :

- Bactéricide  
**EN1276\***, **EN13697** sur Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae.  
**EN13727**, **EN13697**, **EN16615** sur Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.
- Levuricide  
**EN1650**, **EN13697**, **EN13624**, **EN16615** sur Candida albicans.
- Actif sur virus  
**EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus.  
**EN16777** sur Vaccina.



## Précautions d'emploi


Eviter le rejet dans l'environnement.

Aucun pictogramme de danger.

En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche (01.45.42.59.59).

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.

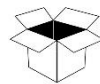

## Conditionnement

**REF : ASEPOP100**

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.

Carton de 12 packs.

Palette de 50 cartons.



## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante.