

**La peau
RACONTE
une multitude
d'histoires.
Il suffit
de savoir
les LIRE.**



Dermatoscopes HEINE



	DELTA 20 T	iC 1	NC 2	mini 3000 LED	mini 3000
Polarisation	Polarisé + non-polarisé (commutable)	Polarisé + non-polarisé (commutable)	Polarisé	Non-polarisé (immersion)	Non-polarisé (immersion)
Éclairage	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	XHL
Grossissement	10 – 16x	jusqu'à 40x numérique	6x/ 10x jusqu'à 30x numérique	10x	10x
Pile / possibilité de recharge	<ul style="list-style-type: none"> Poignée à piles Poignée rechargeable USB Poignée rechargeable pour chargeur de table 	Câble USB	Câble USB	<ul style="list-style-type: none"> Piles AA Poignée rechargeable pour chargeur de table 	<ul style="list-style-type: none"> Piles AA Poignée rechargeable pour chargeur de table
Embout de contact	<ul style="list-style-type: none"> Embout de contact avec graduation Embout de contact sans graduation 	<ul style="list-style-type: none"> Embout de contact sans graduation 	<ul style="list-style-type: none"> Embout de contact sans graduation 	<ul style="list-style-type: none"> Embout de contact avec graduation Embout de contact sans graduation 	<ul style="list-style-type: none"> Embout de contact avec graduation Embout de contact sans graduation
Possibilité de prendre des photos ?	Oui, avec un adaptateur photo SLR disponible en option	Oui, avec un iPhone/iPod touch	Oui, avec un adaptateur pour iPhone/iPod touch	–	–
Accessoires en option	Petit embout de contact pour les endroits difficilement accessibles	–	–	Petit embout de contact pour les endroits difficilement accessibles	Petit embout de contact pour les endroits difficilement accessibles
Page de catalogue	093 / 097	094 / 097	095 / 098	096 / 098	096 / 098

Apple iPhone ou iPod touch n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone et l'iPod touch sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

Dermatoscope HEINE DELTA® 20 T

On ne peut pas soigner ce que l'on ne voit pas

LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



[01]

- ∴ **L'optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes.** Le système de mise au point assure des grossissements de 10 à 16 fois, permettant ainsi de visualiser dans le détail les structures les plus petites.
- ∴ **La fonction « Toggle » permet de passer du mode d'éclairage polarisé au mode d'éclairage non polarisé en appuyant sur un simple bouton.** Il n'est pas nécessaire de changer l'embout de contact. Cette fonction de diagnostic complémentaire permet de reconnaître, en observant des structures et des milieux cristallins, ce que l'on nomme les « blink signs ».
- ∴ **Vision sans reflet. Pas d'éblouissement grâce à la polarisation, même sans liquide d'immersion.** Vous travaillez ainsi vite en vous adaptant aux circonstances.
- ∴ **D'une seule et même main:** réglage individuel de la netteté, correction sur une plage d'environ -6 à +6 dpt.
- ∴ HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.
C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LEDHQ (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).
- ∴ **Le DELTA20 T assure en outre l'archivage numérique:** avec le système de lentilles pour appareil numérique HEINE, le dermatoscope se branche sans problème sur les appareils photo reflex des plus grandes marques. Grâce aux lentilles spéciales de l'adaptateur photo, l'appareil photo et le DELTA20 T forment un duo imbattable.



Film HEINE
DELTA20 T



- ∴ **Embout de contact spécial de petite taille pour l'examen de lésions difficilement accessibles, par exemple entre les doigts ou les orteils.** Pour l'information de commande, voir page 097.

★ **TOPSELLER**



[02]

★

Kits Dermatoscope DELTA 20 T

LED

Kit 1: Dermatoscope DELTA 20 T avec embout de contact avec échelle, BETA4 USB poignée rechargeable avec câble USB et bloc d'alimentation enfichable, sans étui rigide [02]	K-010.28.388
Kit 2: Dermatoscope DELTA 20 T avec embout de contact avec échelle et BETA4 NT poignée rechargeable, sans étui rigide [01]	K-010.24.396
Kit 3: 2x Dermatoscope DELTA20 T avec embout de contact avec échelle, 2x BETA4 NT poignée rechargeable avec chargeur de table NT4, sans étui rigide [03]	K-012.24.422

Met de l'ordre sur votre bureau: le chargeur innovant permet de recharger 2 poignées à la fois!



[03]

Dermatoscope HEINE® iC 1

La dermatoscopie devient numérique. Et mobile.

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Laden im
App Store
App gratuite
HEINE iC 1



∴ **Net, plus net, le plus net.** Le HEINE iC 1 est un enregistreur d'images cliniques et dermatoscopiques pour la documentation et l'assistance au diagnostic différentiel des mélanomes et autres lésions cutanées. Et ce, dans une qualité inédite, nette et sans ombres.

D'une part, en raison de la précision de notre système optique asphérique, d'autre part, grâce à la qualité d'image de 12 mégapixels sur un iPhone®* à partir de la version 6s. Téléchargez simplement l'application iC 1, mettez l'iPhone en place et découvrez la dermatoscopie numérique comme vous ne l'avez encore jamais vue.

∴ **Grand, plus grand, le plus grand.** Le système optique asphérique haut de gamme assurant un grossissement utile de 40 fois propose tout ce dont vous avez besoin dans la pratique.

∴ HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.

C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED^{HQ} (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).

∴ **Sur simple pression d'un bouton – la fonction « Toggle ».** L'un des 2 boutons de commutation étant toujours à portée du doigt, vous alternez entre image polarisée et image en immersion, quelle que soit votre position de travail.

∴ **Beaucoup y voit un smartphone. Nous y voyons un appareil photo d'excellente qualité et un écran haut de gamme.** Nous avons choisi l'iPhone pour sa qualité, sa praticabilité et son coût : de notre point de vue il est équipé du meilleur appareil photo, de l'écran avec la plus haute résolution et relève de technologie tactile la plus avancée.

* Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone et l'iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

★ **TOPSELLER**




iC1 Set/5 pour iPhone 5s et SE	LED
iC 1 avec vitre de contact graduée, coque d'adaptation pour smartphone iC 1/5 pour Apple iPhone 5s et SE, câble USB avec bloc d'alimentation homologué pour l'usage médical	K-271.28.305



iC1 Set/6 pour iPhone 6/6s	LED
Voir ci-dessus, mais avec une coque d'adaptation pour smartphone iC 1/6 pour Apple iPhone 6/6s	K-270.28.305

iC1 Set/7 pour iPhone 7 et 8	LED
Voir ci-dessus, mais avec une coque d'adaptation pour smartphone iC 1/7 pour Apple iPhone 7 et 8	K-273.28.305

Apple iPhone n'est pas compris dans le cadre de la livraison.

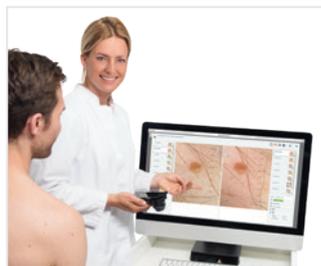

∴ **DÉPISTAGE DES MALADIES DE LA PEAU DANS UNE NOUVELLE DIMENSION : HEINE CUBE SYSTEM.**

Gestion des données et des images pour 10 dermatoscopes HEINE iC 1 numériques mobiles. Moyennant un investissement très raisonnable, vous enregistrez les données de vos patients, traitez les images et contrôlez les risques de progression, ce qui favorise la fidélisation de vos patients. Et vous travaillez selon vos propres critères, de manière confortable et intuitive. Plus d'informations sur notre site internet : www.heine.com/en/digital



Dermatoscope HEINE® NC2

Le dermatoscope tout en un

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



App gratuite
HEINE NC2



- ⋮ **Des images précises.** L'embout de contact [01] avec grossissement par 10, même sans liquide d'immersion, permet d'obtenir une image détaillée sans reflet.
- ⋮ **Zéro contact.** Sans l'embout de contact maintenu par voie magnétique [02], le NC2 avec grossissement par 6 est utilisé pour examiner la peau sur une grande surface de manière hygiénique et efficace, sans le moindre contact.
- ⋮ **Numérique.** Les accessoires iPhone®/iPod®** optionnels et l'application NC2 gratuite que nous avons développée permettent d'utiliser le NC2 comme un appareil photo numérique. Avec un grossissement numérique de 30 fois et une résolution de 12 mégapixels**. Y compris de vastes possibilités de documentation : gestion intégrée des patients, fonction d'e-mail, localisation des images et détails du patient sur un schéma du corps. Également en mode sans contact.
- ⋮ **Éclairage polarisé** pour examen immédiat sans avoir à utiliser de liquide de contact.
- ⋮ HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.
- ⋮ **C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LEDHQ (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).**
- ⋮ **Champ de vision particulièrement large** grâce à l'optique de précision HEINE (lentille de 27 mm de diamètre) pour des images à haute résolution d'une grande netteté.
- ⋮ **Oculaire réglable** de 0 à +3 dpt pour corriger et adapter la mise au point.
- ⋮ **Port micro-USB** pour recharger la batterie Li-ion intégrée. Seul un revendeur agréé est autorisé à remplacer la batterie rechargeable.

* Apple iPhone ou iPod touch n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone et l'iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

** avec iPhone à partir de la version 6s

Trousses de Dermatoscope NC2

LED

★ Dermatoscope NC2 (poignée USB incl.), **embout de contact avec graduation**, câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, dans une mallette [01]
Coque d'adaptateur pour iPhone à commander séparément, voir accessoires page 098.

D-841.78.120

Voir ci-dessus, mais **sans embout de contact**

D-842.78.120

★ **TOPSELLER**



[01]

⋮ **Les Dermatoscopes HEINE NC2 s'utilisent également avec le HEINE Cube System.**

Dermatoscope HEINE mini3000® à LED

Chez nous, même les petits sont à la hauteur

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.



- ∴ **Dermatoscope de poche maniable** : petit mais très performant.
- ∴ HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.
C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED^{HQ} (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).
- ∴ **Apporte deux fois plus de lumière** qu'un dermatoscope XHL (xénon halogène) classique, avec éclairage LED^{HQ} sans entretien, pas besoin de changer la source lumineuse.
- ∴ **Indicateur de performance** : L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie.
- ∴ **Fonction Fade-Out** : luminosité atténuée progressivement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore plus efficace des batteries sèches ou rechargeable.
- ∴ **Grossissement de 10 fois** avec mise au point de l'optique.
- ∴ **Tête d'instrument en métal.**
- ∴ **20.000 cycles marche/arrêt garantis.**
- ∴ Système optique achromatique de haute qualité neutre en matière de couleurs pour des **images nettes et sans distorsions.**
- ∴ **Embout de contact spécial de petite taille** pour l'examen de lésions difficilement accessibles, par exemple entre les doigts ou les orteils.
- ∴ **Poignée en noir ou bleu.**

★ **TOPSELLER**



Trousses Dermatoscope LED mini3000	2,5V LED
★ Dermatoscope LED mini3000 avec embout de contact avec graduation , 10 ml huile de dermatoscopie, mini3000 poignée à piles (avec piles), etui à fermeture éclair	D-888.78.021
Voir ci-dessus, mais avec embout de contact sans graduation	D-887.78.021

Dermatoscope LED mini3000	2,5V LED
avec mini3000 poignée à piles (avec piles), embout de contact avec graduation et 10 ml huile de dermatoscopie	D-008.78.109
Voir ci-dessus, mais avec embout de contact sans graduation	D-008.78.107

Dermatoscope HEINE mini3000® à XHL

Le mini3000 avec éclairage XHL n'a rien à envier à son petit grand frère équipé d'une LED^{HQ} (voir ci-avant). Lui est simplement équipé d'un éclairage XHL. Lumière xénon halogène claire et concentrée pour un éclairage homogène avec un rendu des couleurs authentique.



Dermatoscope XHL mini3000	2,5V XHL
avec mini3000 poignée à piles (avec piles), embout de contact avec graduation et 10 ml huile de dermatoscopie	D-001.78.109
Voir ci-dessus, mais avec embout de contact sans graduation	D-001.78.107

Accessoires pour Dermatoscope DELTA 20 T



[01]

[02]



Tête de Dermatoscope DELTA 20 T	LED
avec embout de contact Ø 23mm avec échelle et précis de dermatoscopie, sans poignée	K-008.34.221
avec embout de contact Ø 23mm sans échelle et précis de dermatoscopie, sans poignée	K-008.34.222

Embout de contact	
23mm Ø, avec graduation [01]	K-000.34.216
23mm Ø, sans graduation [01]	K-000.34.217
★ Petit embout de contact, 8mm Ø [02] pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K-000.34.205

Huile de dermatoscopie	
en boîte de 6 (6x 10ml). Réduit les reflets sur les couches externes de l'épiderme.	K-000.34.005

Adaptateur Photo SLR	
pour dermatoscope/appareil photo numérique SLR, avec optique. Grand champ de vision, image très nette	
Adaptateur photo SLR pour Canon	K-000.34.185
idem, pour Nikon	K-000.34.186

Câble de liaison	
(1,3m) entre poignée et DELTA20	X-000.99.231

Trousse d'accessoires photo	
comprenant Adaptateur Photo SLR, câble de liaison, bague de distance et Etui Ceinture BETA	
Trousse d'accessoires photo pour Canon	K-000.34.190
idem, pour Nikon	K-000.34.191

Etui Ceinture BETA	
pour poignée BETA	X-000.99.008

Accessoires pour Dermatoscope iC 1



[01]



[02]

Accessoires	
Embout de contact avec graduation [01]	K-000.34.201
Coque d'adaptation pour smartphones iC 1/7 pour Apple iPhone 7/8 [02]	K-000.34.253
Coque d'adaptation pour smartphones iC 1/6 pour Apple iPhone 6/6s	K-000.34.250
Coque d'adaptation pour smartphones iC 1/5 pour Apple iPhone 5s/SE	K-000.34.251
Coque d'adaptation de iPod iC 1/T6 for Apple iPod touch 6ème génération	K-000.34.252
Câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales	X-000.99.303

Accessoires pour Dermatoscope NC 2



Accessoires	
Embout de contact avec graduation [01]	D-000.78.114
Coque d'adaptation pour smartphones NC 2/7 pour Apple iPhone 7/8 [02]	D-000.78.127
Coque d'adaptation pour smartphones NC 2/6 pour Apple iPhone 6/6s	D-000.78.126
Coque d'adaptation pour smartphones NC 2/5 pour Apple iPhone 5s/SE	D-000.78.125
Coque d'adaptation de iPod NC 2/T6 pour Apple iPod touch 6ème génération	D-000.78.124
Câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales	X-000.99.303

Accessoires pour Dermatoscope LED / XHL mini 3000



Tête de Dermatoscope LED mini 3000	
avec embout de contact avec graduation , sans poignée	D-008.78.108
avec embout de contact sans graduation , sans poignée	D-008.78.106

Tête de Dermatoscope XHL mini 3000	
avec embout de contact avec graduation , sans poignée	D-001.78.108
avec embout de contact sans graduation , sans poignée	D-001.78.106

Embout de contact	
sans graduation [01]	D-000.78.117
avec graduation [01]	D-000.78.116
Petit embout de contact, 8mm Ø [02] pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K-000.34.008

Huile de dermatoscopie	
en boîte de 6 (6x 10ml). Réduit les reflets sur les couches externes de l'épiderme.	K-000.34.005

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	
pour Dermatoscope mini 3000	X-001.88.109

Etui à fermeture éclair	
pour Dermatoscope mini 3000	D-887.00.000