

Set de pose DIU Evolution - 10 pièces - Ref: A446295DM



Description du produit

Le set de pose DIU Evolution est composé des éléments stériles à usage unique suivants,

Une pince longue Evolution – longueur 25 cm (voir page 11) Une pince de Pozzi – longueur 25 cm (voir page 11) Un

hystéromètre double Evolution – longueur 30 cm (voir page 25) Un ciseau coupe-fils avec encoche afin de bloquer

le fil du DIU entre les 2 lames métalliques – longueur 22 cm en acier inoxydable L'hystéromètre

a deux extrémités comportant des embouts avec dilatation progressive pour toutes les poses de DIU/SIU. Une extrémité

avec dilatation progressive de CH8 (diamètre 2,66 mm) à CH12 (diamètre 4 mm). L'autre extrémité

avec dilatation progressive de CH10 (diamètre 3,3 mm) à CH14 (diamètre 4,7 mm). Chaque extrémité

est protégée par un tube de polyéthylène pour assurer son asepsie. Mode d'emploi : Après

la mise en place du spéculum, utiliser la pince longue Evolution pour la désinfection du col. Saisir le col avec

la pince de Pozzi pour redresser l'utérus et le mettre dans l'axe du vagin. Utiliser l'hystéromètre

en ayant choisi la partie indiquée en fonction du DIU, introduire délicatement l'hystéromètre

dans le canal cervical, jusqu'au fond de l'utérus pour évaluer sa profondeur et vérifier la direction

de l'utérus. Le retirer avec douceur. Mettre en place le DIU en suivant les instructions du fabricant. Couper les

fils du DIU en utilisant la paire de ciseaux coupe-fils. Prescrivez-le à vos patientes ! Disponible en pharmacie à

l'unité- Code ACL 3 66 29 140 030 02 Remboursement Sécurité Sociale 30,35€