


Abri-Form Premium S4

INCONTINENCE

ABRI FORM
Premium



60 - 85 cm

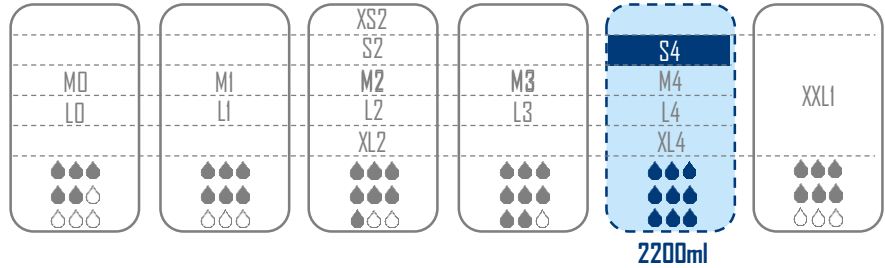

UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE



Top Dry – Couche d'acquisition pour effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.




Air Plus – Voile externe respirant

Le voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



Adhésifs extensibles et repositionnables

Les adhésifs extensibles offrent un confort d'utilisation optimal pour un ajustement parfait à la morphologie de l'utilisateur. Repositionnables, ils ne déchirent pas la protection une fois retirés.

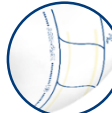

Témoin de saturation

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.



Abri-Form Premium S4


DONNÉES LOGISTIQUES




Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
3	22	66	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
18	1,272 m	36	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 759857		57 03538 759871	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
70,6 x 39,6 x 18,7 cm	6 243 g	5 544 g	40 x 15 x 24 cm

GUIDE D'UTILISATION


POSITION COUCHÉE

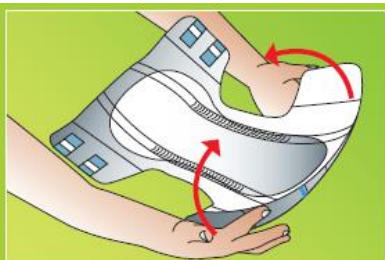

- 1** Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur.
Ne pas toucher l'intérieur de la protection.

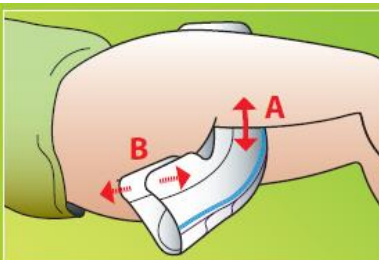

- 2** Placer le résident sur son côté.
A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
B - Ajuster la face arrière du change.

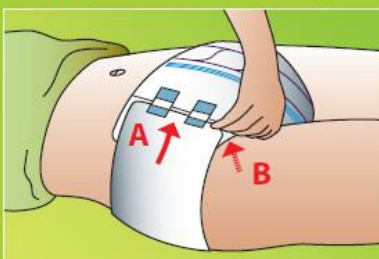

- 3** Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flans arrière sur la parti avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
4 **A** - Fixez les attaches hautes en les orientant vers le bas.
B - Ajuster les bords autour de l'aîne.

POSITION DEBOUT



- 1** Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.



- 2** Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.

- 3** Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aîne.