

Lingettes désinfectantes ASEPTONET

Boîte de 100 lingettes détergentes désinfectantes pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux non-invasifs.

Dispositif médical classe IIa



Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immérgeables et non-invasifs (stéthoscopes, capteurs de pression, connectiques et câbles, ...).



Formule

Ethanol (< 3%), Dimethylbenzylammonium chloride, Propan-2-ol (< 1%).

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
- Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.



Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.



Précautions d'emploi

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.



Conditionnements

REF : ASEP0001

Boîte de 100 lingettes 130 x 200mm.

Carton de 12 boîtes.

Palette de 90 cartons.

REF : REFILL

Recharge de 100 lingettes 130 x 200mm.

Carton de 12 recharges.

Palette de 133 cartons.