



Coffret de secours « Autocar »

RÉFÉRENCE : A0FAR1101APDM

Gencod : 3760098251100



Dimensions :
185 mm x 125 mm x 62 mm



Poids :
280 g

COMPOSITION

DESCRIPTION

- Polypropylène blanc
- Poignée de transport et support mural

CONTENU

- 1 couverture de survie
- 1 masque bouche à bouche
- 1 sachet de 15 pansements assortis :
 - 10 de 20 mm x 72 mm
 - 5 de 53 mm x 70 mm
- 2 compresses stériles individuelles de 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
- 2 paires de gants jetables
- 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 1 livret premiers soins en 10 langues



Arrêté du 18 Mai 2009 modifiant l'arrêté du 02 Juillet 1982 relatif aux transports aux communs de personnes,

« Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l'article 65 du présent arrêté, est le suivant : »

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.





- Couverture de survie
- Masque bouche à bouche
- Pansements adhésifs
- Compresses de gaze
- Bandes extensibles
- Sparadrap
- Paire de ciseaux
- Paire de gants jetables
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Livret 1^{ers} soins



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



MASQUE BOUCHE À BOUCHE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballé individuellement, ce masque, à usage unique, permet de réaliser, grâce à sa valve anti retour, la technique du bouche à bouche dans des conditions d'hygiène optimales.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir le masque de son emballage

1. Tenir la tête de la victime en arriere et vérifier si le patient respire
2. Insérer la valve entre les dents de la victime
3. Pincer le nez de la victime, introduire de l'air et contrôler si la poitrine se lève
4. Laisser la victime expirer, et répéter l'opération immédiatement 3 fois et ensuite toutes les 4 secondes



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"**

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

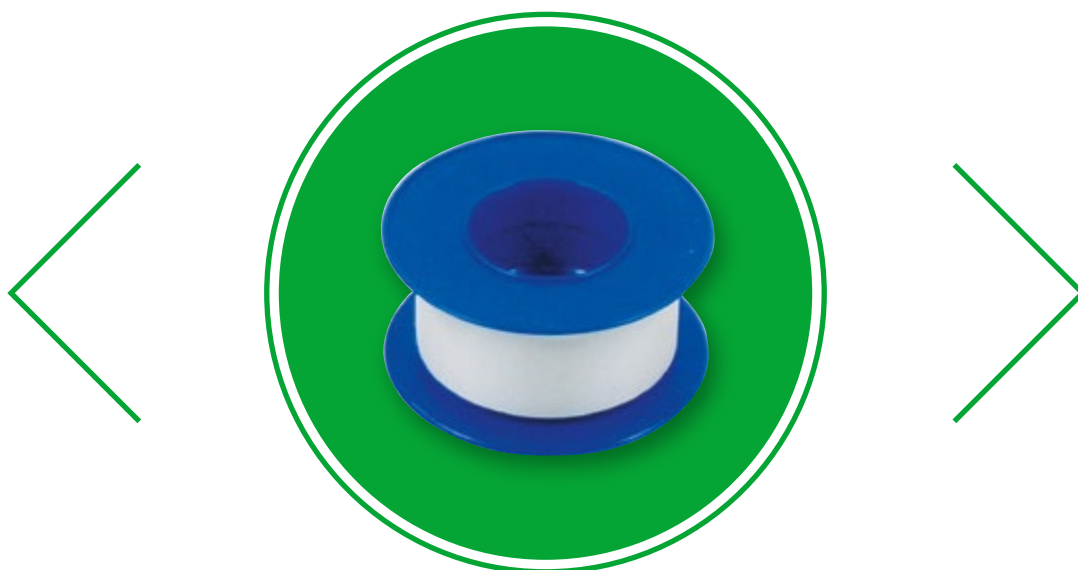

SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire
2. Couper la aux ciseaux, ou à la main
3. Apposer à l'endroit désiré



PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



LIVRET 1^{ers} SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu’il faut faire en cas d’urgence, et contient tous les numéros utiles.