



Valise de secours « Agro-Alimentaire »



4/8 personnes

RÉFÉRENCE : A0VAL2635AGRDM

Gencod : 3760098252688



Dimensions :

240 mm x 180 mm x 75 mm



Poids :

560 g



SIGNALÉTIQUE
« PREMIERS SECOURS »
fournie avec son
grippeur autocollant

COMPOSITION

DESCRIPTION

- Polypropylène blanc
- Poignée de transport et support mural

CONTENU

- 8 pansements adhésifs détectables bleus 25 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs détectables bleus « Bouts de doigts »
- 4 pansements adhésifs détectables bleus « Articulations »
- 1 pansement « brûlure » 43 mm x 68 mm
- 1 pansement « brûlure » 67 mm x 110 mm
- 2 pansements compressifs stériles bleus
- 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 4 m x 6 cm bleues
- 2 bandes extensibles 4 m x 8 cm bleues
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm bleu
- 2 paires de gants jetables
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 5 compresses anti-coups au calendula
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



Fournitures présentées dans une
pochette alvéolée

Valise Eco



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.



VALISE DE SECOURS ALIMENTAIRE 4/8 PERSONNES

Réf. A0VAL2635AGRDM

- Pansements adhésifs bleus en plastique
- Pansements “brûlure” stériles
- Pansement compressif bleu stérile
- Compresse de gaze
- Bandes extensibles bleues
- Sparadrap bleu
- Paire de gants jetables
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Compresse imprégnée de solution à base de calendula
- Dosette de sérum physiologique stérile
- Livret 1^{ers} soins



PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS EN PLASTIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 25 x 72 mm, 50 x 72 mm,
68 x 38 mm “Bouts de doigts”,
68 x 38 mm “Articulations”**

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base tissu. De couleur bleue, ils possèdent un film métallique sous la compresse, qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. Ils permettent la protection des petites plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



PANSEMENTS “BRÛLURE” HYDROGEL

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 43 x 68 mm et 67 x 110 mm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Pansement contenant une compresse d'hydrogel destinée au traitement de petites brûlures et des écorchures. Il soulage la douleur et favorise la cicatrisation. Les retraits sont indolores.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Saisir le pansement
2. Enlever les protections
3. Apposer la compresse sur la partie à protéger
4. Fixer les 2 cotés adhésifs



PANSEMENT COMPRESSIF BLEU STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente à la plaie de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible. Sa couleur bleue lui confère un repérage visuel immédiat. Il permet la protection des plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



BANDES EXTENSIBLES BLEUES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


Existent en 4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm

Sous emballage individuel, ces bandes de couleur bleue, permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

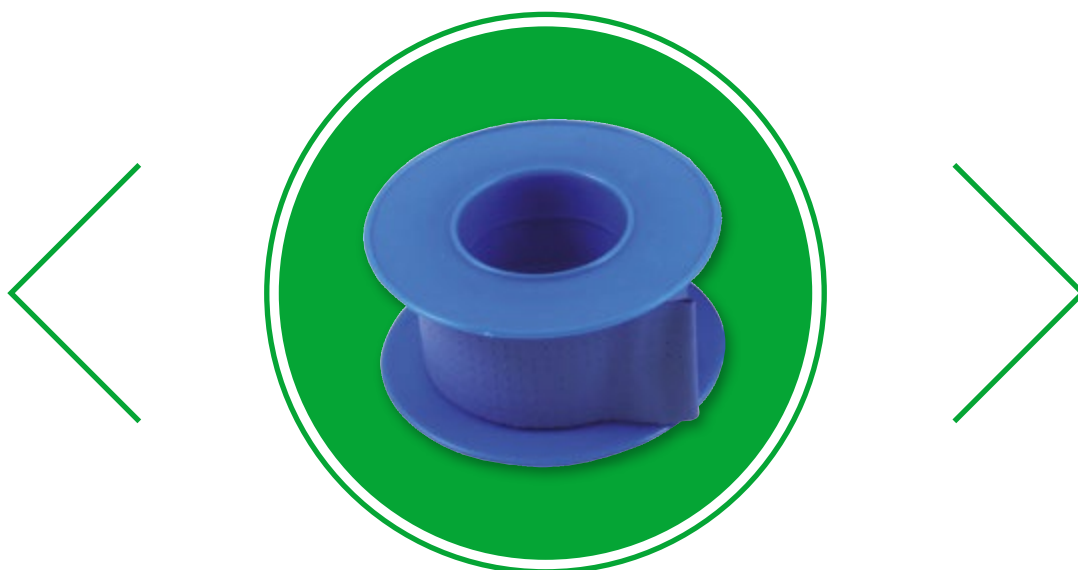

SPARADRAP BLEU

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm et de couleur bleue.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

MODE D'EMPLOI :

1. Oter le rouleau de sa flasque protectrice
2. Dérouler la longueur nécessaire
3. Couper la aux ciseaux, ou à la main
4. Apposer à l'endroit désiré



PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION À BASE DE CALENDULA

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



LIVRET 1^{ers} SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu’il faut faire en cas d’urgence, et contient tous les numéros utiles.