



Coffret de secours « Membre Sectionné »

RÉFÉRENCE : A0FAR2039PPDM

Gencod : 3760098250097

COMPOSITION

DESCRIPTION

- Polypropylène blanc
- Poignée de transport et support mural

CONTENU

- 1 pochette isotherme pour main ou doigts
Pochette permettant la récupération du membre sectionné comprenant 3 compartiments : 1 pour le membre, les 2 autres pour y insérer les packs de froid
- 2 packs de froid instantané
- 1 couverture de survie
Pour couvrir le blessé si nécessaire
- 1 paire de gants jetable
Pour récupérer le membre proprement
- 1 coussin hémostatique, une paire de gants et une compresse stérile 30 cm x 30 cm
Pour faire une compression
- 1 écharpe triangulaire
Pour maintenir le bras blessé
- 1 feuillet explicatif schématisé comprenant les coordonnées des SOS Mains



Dimensions :
250 mm x 190 mm x 90 mm



Poids:
1180 g



SIGNALÉTIQUE
« MEMBRE SECTIONNÉ »
FOURNIE AVEC SON GRIPPEUR
AUTOCOLLANT

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.





COFFRET DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ

Réf. A0FAR2039PPDM

- Pochette isotherme à 3 compartiments
- Pack de froid instantané
- Couverture de survie
- Paire de gants jetables
- Kit coussin hémostatique
- Écharpe triangulaire
- Feuillet “Membre sectionné”



POCHETTE ISOTHERME À 3 COMPARTIMENTS

Cette pochette est destinée à récupérer un doigt ou une main sectionnée, afin de pouvoir transporter le membre dans des conditions d'hygiène optimum.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir la pochette et glisser le membre dans le compartiment du milieu
2. Insérer le pack de froid dans le compartiment extérieur
3. Refermer la pochette grâce au ruban adhésif
4. Remplir la fiche fournie fixée sur la pochette



PACK DE FROID INSTANTANÉ

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Ce pack de froid permet d'obtenir très rapidement (par simple pression) une compresse froide pour soulager les douleurs dues aux coups. Il permet également de procurer le froid nécessaire à la conservation dans les meilleures conditions, un membre sectionné. (en complément de la pochette isotherme à 3 compartiments).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Presser le sachet en son milieu afin de casser la bulle incluse
2. Agiter le sachet afin de mélanger le contenu
3. Utilisation pour :
 - Cryothérapie cutanée : Appliquer sur la partie intéressée
 - Maintien au froid d'un membre coupé : Insérer le pack dans un des 2 compartiments extérieurs de la pochette isotherme



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



KIT COUSSIN HÉMOSTATIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Contenant un coussin, cousu sur une bande élastique de contention, ainsi qu'une paire de gants, ce produit est destiné à se substituer à la compression manuelle. Il permet d'arrêter une hémorragie.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer l'emballage et mettre les gants avant de pratiquer la pose du coussin
2. Dérouler la bande et poser la compresse sur la plaie
3. Enrouler la bande autour du membre
4. Fixer la grâce au système de fixation auto adhésif



ÉCHARPE TRIANGULAIRE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, elle permet de soutenir un bras blessé, ou d'emballer toute partie du corps.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir l'écharpe de son emballage et la déplier

1. Glisser l'écharpe entre l'avant bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule
2. Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule
3. Rassembler par un nœud plat autour du cou ou fixer la avec une épingle de sûreté



FEUILLET “MEMBRE SECTIONNÉ”

Cette notice explicative schématisée, vous permettra d'utiliser chaque produit contenu dans le coffret de manière optimale.

Elle contient également tous les numéros d'urgence, et la liste nationale des “SOS mains”